

REF
ISEW-10015Packing Size/
Ambalaj
3 x5 mLCONT
R: 3x5 mL PEPSIN
R: 3x5 mL Reconstitution Liquid

: 2-8 °C CE IVD

INTENDED USE

It is used in the ISE systems for the washing and cleaning at the end of the day.

REAGENTS

Pepsin
Reconstitution Liquid : 0.1 N HCl

Stabilizers and preservatives.

REAGENT PREPARATION

1 vial of Reconstitution Liquid is added to 1 vial of Pepsin.
Make it solve without getting foamed by swirling the bottle gently.

STABILITY AND STORAGE

Reagents are stable between 2-8°C until the last expiry date on the label.

After reconstitution, stable for 10 days between 2-8°C

CAUTION

H314 Causes severe skin burns and serious eye damage.

H335 May cause respiratory irritation

P303+P361+P353 IF ON SKIN: Remove/take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower

P304+P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

P305+P351+P338 IF IN EYES : Rinse continuously with water for several minutes . Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing

KULLANIM AMACI

ISE sistemlerinde gün sonu yıkama ve temizlikte kullanılır.

REAKTİFLER

Pepsin
Çözücü likit: 0.1 N HCl
Stabilizatör ve koruyucu.

REAKTİFİN HAZIRLANMASI

1 şişe Pepsin içerisine 1 şişe çözücü likit ilave edilir.
Köpürtmeden karıştırarak iyice çözünmesi sağlanır.

STABİLİTE VE DEPOLAMA

Reaktifler 2-8°C de etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar dayanır.

Çözünmüş reaktifler 2-8°C de 10 gün saklanabilir.

ÖNLEMLER

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve ciddi göz hasarına yol açar

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir

P303+P361+P353 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE; kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkartın ,cildinizi su ile yıkayın/duş alın.

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun

P305+P351+P338 Gözle teması halinde suyla birkaç dakika durulayınız. Takılı ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz.



Caution, refer to accompanying documents.
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.
Biyolojik risk



Consult instructions for use.
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.
Çevreyi kirlenmeye çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TURKEY • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23
www.btproducts.com.tr - www.bilimseltip.com

Rev.Date-Tarih / No: 24.11.2017/4