

**SURFACE-ACTIVE AGENT**

The Surface Active Agent is a concentrated liquid, it increases the flow of the liquids in the hydraulic circuits of all automatic analyzer.

**REAGENT**

Detergent  
Deionized water  
Stabilizers and preservatives.

**REAGENT PREPARATION**

For BT35i :Add 1 mL of the concentrated solution per every liter of deionized water container of the Analyzer.  
For BT125 :Add 2 mL of the concentrated solution per every liter of deionized water container of the Analyzer.  
It is recommended to prepare weekly a fresh solution throwing away the old solution and washing the water bottle with distilled water

**STABILITY AND STORAGE**

Reagents are stable between 15-25°C until the last expiry date on the label. Avoid from direct sun light.

**CAUTION**

It can irritate skin, if contact wash with plenty of water.

**YÜZEY-AKTİF REAKTİF**

Sıvı konsantre YüzeY Aktif Reaktif, otomatik analizörlerde hidrolik devrelerde sıvı akışkanlığını artırır.

**REAKTİF**

Deterjan  
Deiyonize su  
Stabilizatör ve koruyucu.

**REAKTİFİN HAZIRLANMASI**

BT35i için:Analizör su tankındaki her bir litre deiyonize su için 1 mL konsantre solüsyon ilave edilir.  
BT125 için:Analizör su tankındaki her bir litre deiyonize su için 2 mL konsantre solüsyon ilave edilir.  
Analizör su tankı yıkandıktan sonra, reaktif haftalık kullanım için hazırlanmalıdır, eski hazırlanan reaktifin kullanılmaması tavsiye edilir.

**STABİLİTE VE DEPOLAMA**

Reaktif 15-25°C de etiketinde belirtilen son kullanma tarihine kadar dayanır. Direkt güneş ışığından koruyun.

**ÖNLEMLER**

Deriyi tahriş edebilir, temas durumunda bol su ile yıkayın.



Caution, refer to accompanying documents.  
Beraberindeki dokümanları inceleyiniz.



Biological risk.  
Biyolojik risk



Consult instructions for use.  
Kullanım için prospektüsü okuyun.



Do not dispose of in environment.  
Çevreyi kirliletmeyin çöpe atınız.



Manufacturer / Üretici  
Bilimsel Tıbbi Ürünler Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Rev.Date-Tarih / No: 26.02.2021/3  
P:1/1

**BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

9 Eylül Mah. 312/1 Sokak No:12 Gaziemir - İZMİR - TÜRKİYE • Tel.:+90.232. 262 60 83 • Fax:+90.232. 250 61 23  
www.btproducts.com.tr - www.bilimseltip.com